

GRAND OPTICAL

All-Inclusive

PRODUKTOVÝ LIST

Název	Typ	Obsah	Popis
iWear Hydro Spherical	PE DRHY	Omafilcon B 38%, H2O 62%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear Hydro Astigmatism	PE DRTS	Omafilcon A 40%, H2O 60%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear DR Comfort	PE DRCO	Ocufilcon D 45%, H2O 55%	Měkké kontaktní čočky s UV filtrem v pufovaném fyziologickém roztoku.
iWear Balance Plus	PE XRBA	Fanfilcon A 45%, H2O 55%	Měkké kontaktní čočky s UV filtrem v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear Oxygen Spherical	PE XRSU	Comfilcon A 52%, H2O 48%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear Oxygen Astigmatism	PE XRTS	Comfilcon A 52%, H2O 48%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear Oxygen Relax	PE XRRE	Comfilcon A 52%, H2O 48%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear Oxygen Presbyopia	PE XM1D / XM1N, PE X15D / X15N, PE XM2D / XM2N, PE XM5D / XM5N	Comfilcon A 52%, H2O 48%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear Oxygen Astigmatism Presbyopia	PE MT1D / MT1N, PE M15D / M15N, PE MT2D / MT2N, PE MT5D / MT5N	Hycomfilcon A 52%, H2O 48%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku
iWear Oxygen Astigmatism XR	PE XRTX	Comfilcon A 52%, H2O 48%	Měkké kontaktní čočky v pufovaném fyziologickém roztoku

Výrobce: CooperVision, Hamble SO31 4RF, Velká Británie – Scottsville, NY 14546, USA – Juana Diaz, PR 00795, USA
Distribuuje GrandVision Supply Chain B.V. Evert van de Beekstraat 1-80. 1118 CL Schipol, Nizozemsko.
Místo původu: Velká Británie, CE 0123

GRAND OPTICAL

All-Inclusive

Používání kontaktních čoček

Před vyndáním a použitím čoček vždy zkontrolujte, zda není obal porušený. V takovém případě můžete čočky vrátit, stačí je přinést do obchodu spolu s dokladem o koupi. Zkontrolujte si také datum expirace, které je vždy na obalu uvedeno.

Aplikace

1. Důkladně si umyjte a osušte ruce.
2. Opláchněte čočku roztokem.
3. Dejte si čočku na špičku suchého ukazováčku.
4. Prsty druhé ruky roztáhněte oční víčko.
5. Oko zaměřte nahoru a nasadte si čočku.
6. Zakružte očima a zamrkejte, aby se čočka správně usadila.

Skladování a čištění

1. Naplňte pouzdro na čočky roztokem. Vyndejte pravou čočku z oka a vezměte ji do dlaně.
2. Nalijte na čočku několik kapek roztoku a očistěte ji jemnými kruhovými pohyby ukazováčku druhé ruky.
3. Po vyčištění čočku opět opláchněte a vložte do pouzdra. Je důležité, aby byla čočka zcela ponořená v roztoku.
4. Zavfete víčko a proveďte stejný postup s levou čočkou.
5. Před dalším nasazením by se měly čočky dezinfikovat nejméně čtyři hodiny. Ideální je nechat je v pouzdru celou noc.
6. Až čočky opět vyndáte, vylijte použitý roztok, opláchněte pouzdro čerstvým a poté nechte oschnout.

Důležité!

Vždy používejte pouze roztok, který je vhodný pro Vaše kontaktní čočky.

Nikdy nepoužívejte k čištění kohoutkovou vodu!

Nedávejte do úst!

Roztok nepoužívejte opakovaně!

Neměňte ani nemíchejte různé výrobky (zejména roztoky) pro péči o čočky.

Nenoste čočky, pokud jsou Vaše oči nemocné či poraněné. Nedoporučujeme to ani při rýmě, chřipce či při onemocnění vyvolaném alergií!

V případě zánětu v očích zlikvidujte čočku i pouzdro.

Po uzdravení použijte obojí nově.

Pokud vnímáte v očích nepříjemné nebo neobvyklé příznaky, vyjměte kontaktní čočky z očí a obraťte se na odborníka!

Nošení kontaktních čoček nevylučuje použití make-upu. Důležité je čočky nasazovat před líčením a vyndávat před odstraňováním make-upu!

Dbejte na to, aby se sprej na vlasy či jiná aerosolová kosmetika nedostala do Vašich očí!

Při nošení čoček se snažte vyhnout zakouřenému a prašnému prostředí!

Nepoužívejte čočky při kosmetickém ošetření, v sauně, v soláriu, při plavání a koupání!

Abyste měli jistotu správné péče o zrak, doporučujeme zajít na vyšetření zraku alespoň jednou ročně.

Záruční doba kontaktních čoček je šest měsíců.

V případě stížností či dotazů se můžete obrátit na jakoukoliv naši prodejnu, jejichž seznam najdete na stránkách www.grandoptical.cz, nebo můžete volat naši Zákaznickou linku 800 11 99 00, kde Vám rádi poradíme.